


**「再使用禁止」**

医療用品 01 エックス線フィルム  
一般医療機器 画像診断用自己現像フィルム（JMDN：40983000）

**AgfaDrystarDT フィルム  
(1B、1C、2B、2C、MAMMO)****【形状・構造及び原理等】****1. 形状・構造**

支持体に銀塩感熱材料を塗布したものです。

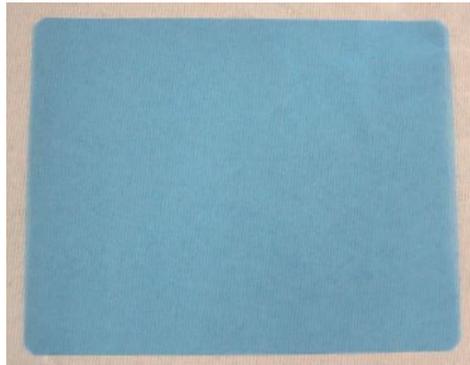

フィルム外観

**2. 動作原理**

フィルム乳剤中の熱反応性有機銀塩がサーマルイメージャから熱が加えられると、化学反応により黒化します。この黒い画像が診断画像となります。

**【使用目的又は効果】**

サーマルヘッド方式の画像診断用イメージャのハードコピーとして使用されるフィルムです。専用イメージャ（以下、装置という）と組み合わせることで使用することにより、医師の診断に有効な画像情報を提供することができます。

**【使用方法等】****1. 装置**

本フィルムに適合した装置の操作方法に従い、専用装置で使用して下さい。

**2. フィルムの装填**

本フィルムに適合した専用装置の操作方法に従い、未使用のフィルムを装填して使用して下さい。

**【使用上の注意】****1. 重要な基本的注意**

- ・開封後はなるべく早めに使用すること。
- ・局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
- ・フィルムは高温となる場所（窓際、暖房器具など）のそばで保管・放置は避けること。
- ・フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
- ・静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
- ・濡れた手による取扱いは避けること。
- ・再使用は避けること。
- ・使用目的以外に使用しないこと。
- ・長時間高湿度下での取扱いは避けること。特にスポットライトやOHPを使用する場合には注意すること。

**2. その他の注意事項**

フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼して下さい。

**【保管方法及び有効期間等】****1. 保管方法**

(1)未使用フィルムは、直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温、低湿の場所に保管して下さい。推奨温度、湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

(2)現像後のフィルムは、薬品、溶剤などの付着により画質に影響を及ぼします。直射日光や高温になる室内・車内での長時間の放置は避けて下さい。

**2. 有効期間**

有効期間（使用期限）は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

**【包装】**

サイズ・枚数・包装形態については、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

**【主要文献及び文献請求先】**

フジデノロ株式会社  
〒485-0053 愛知県小牧市多気南町 361 番地 1

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】****製造販売業者**

フジデノロ株式会社  
〒485-0053 愛知県小牧市多気南町 361 番地 1  
電話番号 0568-73-7575

**外国製造業者**

Agfa HealthCare NV. (Belgium)

**製造業者（包装等）**

フジデノロ株式会社  
〒485-0053 愛知県小牧市多気南町 361 番地 1