


「再使用禁止」

医療用品 01 エックス線フィルム
一般医療機器 画像診断用自己現像フィルム（JMDN：40983000）

**DVC クリアフィルム
(810、1417)****【形状・構造及び原理等】****1. 形状・構造**

支持体に感熱材料を塗布したものです。

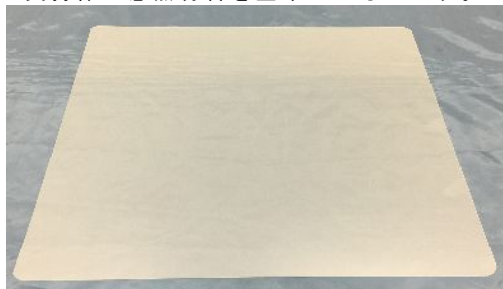

フィルム外観

2. 動作原理

フィルム乳剤中の熱反応性物質がサーマルイメージャからの熱が加えられると、化学反応を起こし黒化します。この黒い画像が診断画像となります。

【使用目的又は効果】

ドライイメージャでのハードコピーに使用される、クリアベースのフィルムです。

【使用方法等】

画像診断用イメージャの出力用メディアとして使用します。

【使用上の注意】**1. 重要な基本的注意**

- ・開封後はなるべく早めに使用すること。
- ・局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけないこと。
- ・フィルムは高温となる場所（窓際、暖房器具など）のそばで保管、放置は避けること。
- ・フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
- ・静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
- ・濡れた手による取扱いは避けること。
- ・二重露光は避けること。
- ・使用目的以外に使用しないこと。
- ・長時間高温下での取扱いは避けること。特にスポットライトや OHP を使用する場合には注意すること。

2. その他の注意事項

フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び使用期間等】**保管方法**

- (1) 未使用フィルムは直射日光を避けて、放射線や X 線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温、低湿の場所に保管して下さい。推奨温度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

- (2) 熱現像後のフィルムは、薬品、溶剤などの付着により画質に影響を及ぼします。直射日光や高温になる室内、車内での長時間の放置は避けて下さい。

2. 有効期間

有効期間（使用期限）は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【包装】

サイズ、枚数および包装形態については、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【主要文献及び文献請求先】

フジデノロ株式会社
〒485-0053 愛知県小牧市多気南町 361 番地 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者**

フジデノロ株式会社
〒485-0053 愛知県小牧市多気南町 361 番地 1
電話番号 0568-73-7575

外国製造業者

Codonics Inc. (USA)

製造業者（包装等）

フジデノロ株式会社
〒485-0053 愛知県小牧市多気南町 361 番地 1